

ZeptAir

Thérapie par aérosol portatif



Nébuliseur à mailles portable

ZeptAir est une **solution innovante de nébulisation** doté d'un système à mailles et ultrasons qui offre un traitement **portable efficace**, dans un contexte dans lequel nous assistons à une augmentation significative d'individus de **tous âges** atteints de **maladies respiratoires chroniques** : **asthme, bronchite, MPOC, pneumonie**.

Ce **système de thérapie à portée de main** possède un taux de nébulisation délivrant jusqu'à **0,9 ml** de médicament par minute, et offrant ainsi des traitements par aérosol de **courte durée**. Livraison rapide de médicaments et moins de médicaments gaspillés.



Poumons

Alvéoles

La vitesse de vibration ultrasonique du **disque à mailles ZeptAir** produit des nanoparticules d'aérosol qui atteignent immédiatement les bronches - à défaut d'être retenues dans la partie supérieure du système respiratoire - **et permettent efficacement l'élimination de la cause d'une infection**.

Système ultra-efficace de thérapie par aérosol

Nouvelle technologie de maillage

Permet la création de particules d'aérosol ultrafines qui pénètrent en profondeur dans les poumons avec un **diamètre aérodynamique médian en masse inférieur à 5 micromètres**.



Insonore

Atomisation des particules efficace et **silencieuse** pour un traitement **confortable**.



Pratique

Un poids, une dimension et des courbes offrant une utilisation confortable en toutes circonstances.



Système de recharge portable intégré pour un traitement en tous lieux.



Caractéristiques



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Couvercle | 7 | Unité principale |
| 2 | Réservoir de médicament | 8 | Bouton de nébulisation |
| 3 | Buse de pulvérisation | 9 | Port de chargement USB |
| 4 | Bouton marche/arrêt | 10 | Embout buccal |
| 5 | Augmenter le taux de nébulisation | 11 | Masque |
| 6 | Diminuer le taux de nébulisation | | |

Mode de fonctionnement

L'appareil dispose de deux modes : **fonctionnement continu** et à la **demande**.

Sélectionnez le mode « **Micro-ondes** » en appuyant sur le **bouton d'alimentation** pendant 3s pour un ajustement automatique de la vitesse de nébulisation en fonction de la fréquence respiratoire.

Le mode de fréquence à la **demande** permet un réglage manuel. Basculez entre les deux modes en appuyant sur le **bouton d'alimentation**. Pour une vitesse de nébulisation personnalisée, sélectionnez le taux adapté en appuyant sur les **boutons** « + » ou « - ».

Réservoir de médicaments

Remplaçable, détachable et **possédant** une capacité de solution liquide de **10 ml**. Peut être utilisé avec toutes les solutions liquides médicamenteuse.

Bouton marche

Thérapie immédiate d'une simple pression sur un bouton.

Embouchure et Masque

Le **nébuliseur portable Zepter** dispose d'un **embout buccal** ainsi qu'un **masque** pour une commodité maximale favorisant le traitement d'individus de tous âges. Les enfants sont en mesure de maintenir une occupation durant l'administration du traitement.

Chargement USB

Le temps de charge est d'environ **2 heures, 60 minutes d'utilisation continue** après une charge complète, permettant plusieurs doses sur une seule charge.

Voyants **LED indiquant** le niveau de batterie faible.

Respirez **facilement**, respirez **sainement**

Avoir un nébuliseur **portable et facile à utiliser** qui offre un soulagement à la demande dans les **plus brefs délais** améliorera considérablement votre vie, et vous permettra de profiter pleinement de la vie.

Où que ce soit - à l'école, au travail, dans un avion, lors d'une promenade ou simplement en déplacement, **le nébuliseur à mailles ZeptAir** vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie.



Cette **solution compacte** de taille idéale offre un **traitement efficace** pour toute la famille, **en tous lieux** et **en toutes circonstances**.



ZeptAir est la solution idéale pour **les patients âgés** qui ont des difficultés à utiliser les nébuliseurs traditionnels.



Combinaison du **Nébuliseur portable à mailles** avec le **complexe essentiel subcellulaire Hyperlight FluidFusion**

En combinaison avec le complexe essentiel subcellulaire Hyperlight Fluid Fusion, le nébuliseur portable à mailles Zepter offre une thérapie bénéfique pour tout le corps, et en particulier pour le système respiratoire. S'il est utilisé régulièrement, il favorise le renforcement du système immunitaire ainsi que le développement d'une barrière impénétrable contre les infections pathogènes, les bactéries et virus.



Découvrez plus d'informations sur la dernière technologie brevetée de Zepter : Hyperlight Subcellular Essential Complex.



Zepter France
4 Square Pétrarque
75116 Paris
France

Zepter Monaco
5 Avenue Saint Laurent
98000 Monte Carlo
Monaco